

OZODROP® IVT

SOLUZIONE OFTALMICA Protettiva e Lubrificante

OZODROP IVT è una soluzione oftalmica protettiva, lubrificante, idratante e lenitiva, a base di ipromellosa, liposomi ed olio vegetale ozonizzato, utile:

- nel favorire i processi riparativi dopo stress chirurgici o traumatici;
- nel trattamento dei sintomi legati a patologie di tipo infiammatorio, anche di origine infettiva;
- nel trattamento della secchezza oculare, anche in presenza di irritazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici, come l'applicazione di lenti a contatto.

La presenza dell'olio vegetale e dei liposomi favorisce la stabilizzazione della fase lipidica del film lacrimale, riducendo l'evaporazione della fase acquosa e garantendo un sollievo immediato. L'olio vegetale utilizzato è ozonizzato e quindi autopreservato, reso più biodisponibile e biotollerabile dall'inserimento all'interno dei liposomi.

Indicazioni

OZODROP IVT è indicato:

per la protezione e la lubrificazione corneale prima e dopo interventi chirurgici (es. iniezioni intravitreali), in caso di traumi oculari, dopo l'utilizzo di lenti a contatto o in caso di alterazioni della superficie oculare da instabilità del film lacrimale, presente anche in pazienti con infezioni oculari ricorrenti.

OZODROP IVT è anche indicato nel trattamento lenitivo dei sintomi legati a patologie di tipo infiammatorio, anche di origine infettiva.

Modalità d'uso

Instillare una o due gocce in ciascun occhio una o più volte al giorno o secondo parere del medico.

Dopo l'uso, gettare il contenitore.

Il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto indossate.

Composizione

Lipozonoye (olio di semi di girasole ozonizzato, fosfolipidi di soia) idrossipropilmetilcellulosa, acido bórico, sodio tetraborato, sodio edetato, PHMB, acqua depurata.

Avvertenze

- Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto;
- Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti;
- Non riutilizzare. Gettare il flacone monodose con il contenuto residuo dopo l'uso;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sui flaconi monodose;
- Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 8 e 25 °C;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- Non ingerire;
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra;
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico;
- Prestare attenzione affinché la punta del flaconcino monodose non entri in contatto con l'occhio;
- Somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti per uso topico oftalmico;
- Una leggera variazione nella opalescenza della soluzione oftalmica non rappresenta un'alterazione della qualità del prodotto.

 **FB VISION S.r.l.**
via Piceno Aprutina, 47
Ascoli Piceno - Italy

**15 monodose
da 0,35 ml**


0477

STERILE A



OZIVTmF000719

Rev. 05/2019

FBVISION
Ophthalmic Pharmaceuticals

fb-vision.it

