

BlefOX®

**SCHIUMA SPECIFICA PER L'IGIENE
DI PALPEBRE E CIGLIA DI ADULTI E BAMBINI**

50 ml e

Che cos'è e a cosa serve BlefOX®

BlefOX® è una schiuma delicata specifica per l'igiene delle palpebre e delle ciglia che permette una efficace rimozione delle secrezioni palpebrali, sia lipidiche che secche, dei residui cellulari e di altri contaminanti, che vengono rilasciati in corso di stati infiammatori quali blefariti e blefarocongiuntiviti e che possono causare un peggioramento dell'infiammazione stessa. Queste secrezioni sono associate anche con una crescita batterica lungo i margini palpebrali e alla base delle ciglia, favorita dalla produzione di un biofilm adesivo; l'infiammazione che ne consegue può interessare anche le ghiandole che producono la componente lipidica del film lacrimale, le ghiandole di Meibomio, con conseguente secchezza oculare a causa della maggiore evaporazione delle lacrime.

BlefOX® può essere utile anche per la detersione di palpebre e ciglia prima e dopo interventi chirurgici oculari.

BlefOX® contiene LipozonEye (olio ozonizzato liposomiale), Aloe vera gel liofilizzato, Eugenia caryophyllus olio essenziale che contribuiscono a pulire, idratare e rinfrescare le palpebre, e a lenire i sintomi irritativi dovuti ai processi infiammatori.

Data la sua composizione peculiare, **BlefOX®**:

- è utile per prevenire e/o migliorare la sintomatologia di affezioni oculari quali blefariti, blefarocongiuntiviti, permettendo anche una migliore lubrificazione della superficie oculare. L'olio ozonizzato contribuisce a detergere e asportare efficacemente il biofilm batterico che si forma sulle palpebre e ciglia;
- può contribuire a ridurre il rischio di infezioni dovute ai batteri presenti sulle palpebre e ciglia, prima e dopo chirurgia oftalmologica, e in corso di blefariti.

BlefOX® può essere impiegato sia negli adulti che nei bambini.

La schiuma non contiene profumi e può essere facilmente applicata sulle palpebre e ciglia.

Modalità d'uso

Lavare accuratamente le mani prima dell'uso di **BleFOX®**.

Premere l'erogatore per dosare la schiuma sul dischetto di cotone contenuto nella confezione, o su una garza pulita o, in alternativa, sulla punta delle dita. Nel caso di impiego prima e dopo interventi chirurgici, la schiuma va utilizzata su una garza monouso.

Chiudere gli occhi e massaggiare le palpebre con la schiuma.

Non aprire gli occhi durante l'applicazione.

Lasciare agire la schiuma per circa 1 minuto e ripetere l'applicazione per 2-3 volte al giorno, per un periodo di almeno 7 giorni.

Dopo ogni applicazione sciacquare le palpebre e le ciglia con acqua tiepida.

Ripetere gli stessi passaggi per l'altro occhio.

Avvertenze

Lavare accuratamente le mani prima dell'impiego del prodotto. Rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso. Tenere gli occhi chiusi durante l'applicazione. Il prodotto è destinato all'area periculare esterna (palpebre e ciglia). Non applicare il prodotto direttamente sugli occhi. Se il prodotto dovesse venire accidentalmente in contatto con gli occhi, si consiglia di lavare via con abbondante acqua. Non usare se si è allergici ad uno degli ingredienti. Se si dovesse verificare irritazione, sospendere immediatamente l'uso del prodotto, lavare gli occhi e contattare un medico. Conservare in luogo asciutto, a temperatura compresa tra 8°C e 25°C. Conservare lontano dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Usare entro 2 mesi dall'apertura. Non usare oltre la data di scadenza.

Composizione

LipozonEye	10,00%
Aloe vera gel liofilizzato	30,00%
Eugenia caryophyllus olio essenziale	0,01%
Betaina cocamidopropilica	3,50%
Propanediolo	4,00%
Disodio cocoil glutammato	1,00%
Idrossiacetofenone	0,50%
Sodio cocoil glutammato	0,25%
O-cimen-5-ol	0,1%
Acqua depurata	q. b. a 100%



FBVISION
Ophthalmic Pharmaceuticals