

20 Garze Oftalmiche Monouso

Specifiche per la prevenzione delle infezioni della zona perioculare dell'adulto e del bambino

Cos'è e a cosa serve OZOLID®

OZOLID® garze oftalmiche è un Dispositivo Medico per una efficace rimozione meccanica delle secrezioni, sia lipidiche che secche, dei residui cellulari e di altri contaminanti da palpebre e ciglia che vengono rilasciati in corso di stati infiammatori quali blefariti, blefarocongiuntiviti, orzaioli, calazi o in caso di traumi della zona perioculare.

OZOLID®, inoltre, grazie all'olio ozonizzato e ai liposomi, promuove la disgregazione del biofilm, un naturale meccanismo di difesa che i batteri mettono in atto e che si può formare lungo i margini palpebrali. L'accumulo del biofilm può causare e peggiorare i processi infiammatori e infettivi a carico delle palpebre; la rimozione del biofilm, pertanto, contribuisce a ridurre la sintomatologia infiammatoria dovuta all'azione dei batteri stessi. La rimozione delle secrezioni e del biofilm batterico da palpebre e ciglia è utile anche prima e dopo interventi chirurgici oculari, in quanto previene e riduce il rischio di infezioni post-operatorie dovute alla proliferazione dei microrganismi.

OZOLID® è indicato:

- in caso di blefariti e blefarocongiuntiviti, sia di tipo infettivo che allergico, di orzaioli e di calazi, per la rimozione delle secrezioni di palpebre e ciglia fornendo così sollievo alla sintomatologia;
- prima e dopo chirurgia oftalmologica per ridurre le infezioni dovute a batteri presenti su palpebre e ciglia.

OZOLID®, grazie all'elevata tollerabilità dei suoi componenti, può essere impiegato quotidianamente per la protezione della zona perioculare.

Componenti

Garza in TNT imbevuta con una soluzione contenente: LipozonEye (Olio vegetale ozonizzato autopreservato, Liposomi), Idrossipropilmetilcellulosa, Acido bórico, Sodio tetraborato, PHMB, Acqua depurata.

Modalità d'uso

Dopo aver pulito le mani in modo adeguato, aprire la bustina ed estrarre la garza. Passare delicatamente la garza sulla zona palpebrale, eseguendo alcuni movimenti circolari leggeri, in modo da permettere un'adeguata rimozione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, polvere, ecc.). Nel caso di secrezioni di difficile rimozione o di infiammazioni che interessano il bordo palpebrale (blefariti, blefarocongiuntiviti, orzaioli, calazi) è consigliabile scaldare la bustina chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40°) e utilizzare poi la garza come impacco caldo. Nel caso di gonfiore palpebrale è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per almeno un'ora e applicare poi per qualche minuto sulle palpebre chiuse.

Avvertenze

Utilizzare una garza per occhio. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite esclusivamente dall'integrità della confezione. Seguire attentamente le istruzioni del medico. Non riutilizzare mai la stessa garza, ma gettarla subito dopo l'uso. Uso esterno. Non disperdere dopo l'uso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

Confezione

Scatola da 20 Garze monouso in TNT.

USO ESTERNO